

類別：機械器具 81 磁気治療器


管理医療機器 一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器（JMDN コード 71016000）

販売名：大人の癒し®

【禁忌・禁止】

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、または脳脊髄液短絡術用可変シャントなどの医用電気機器を使用している人は誤動作を招く恐れがあるので使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

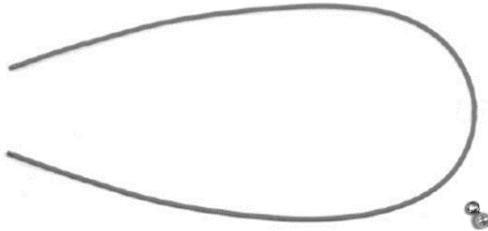

1. 構成

- 本体
- 付属品：ペンダント
- 添付文書

2. 本体の寸法

- 全長 55 cm ± 2 cm、

3. 磁石寸法、個数

- 磁石寸法：外径 1.5 φ (±0.5) × 長さ 4 mm (±0.1 mm)
- 磁石個数：136ヶ

4. 動作原理

- 永久磁石の磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療する。

5. 最大磁束密度

- 130 mT ± 30 mT

6. 磁束密度 mT

- 計量法に定められた磁束密度の計量単位「mT（ミリテスラ）」である。
10 ガウス = 1 ミリテスラ
1 テスラ = 1000 ミリテスラ

【使用目的又は効果】

- 装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

使用に当たっては、本添付文書をよく読んで使用すること。
また、機器に異常がないか確認してから使用すること。

1. 使用方法

- (1) 一般的なネックレスと同様に、首に直接着用する。
- (2) 留め具を有しないため、取り外しは磁石の吸着力を利用して行う。

【使用上の注意】

- 次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性があるため使用しないこと。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント〔頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にパイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療機器〕などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人
- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用すること。
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓障害のある人
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に感染症及び/又は創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温 38℃ 以上（有熱期）の人

例1. 急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。

例2. 衰弱しているとき

- ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人
- 乳幼児が製品を噛み砕き、飲み込まないように、乳幼児の手の届かない所に置くこと。

- 他の治療器と同時に使用しないこと。
- 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談すること。
- 付属品は指定されたものを使用すること。
- 頭部に使用しないこと。
- 使用する前には次のことに注意すること。
 - 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないこと。
 - 製品に破れなどがなくないかを点検、磁石の装着部に破れなどがある場合は使用しないこと。
 - しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認すること。
- 使用中には次のことに注意すること。
 - 機器に故障が発見された時は、使用を直ちに中止すること。
 - 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止すること。
 - 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた時は、使用を直ちに中止すること。
 - 磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止すること。
- 使用后、保管には次のことに注意すること。
 - 機器を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従うこと。
- 機器の故障及び取扱いには次のことに注意すること。
 - 機器は、改造しないこと。
 - 機器の故障は、販売店又は製造販売元に連絡すること。
- ネックレス以外の用途で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 強力な磁石又は、強磁性材の近くはさけて保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、点検修理を依頼すること。

【包装】

- 専用ケースに製品1本及び付属品を封入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：有限会社林製作所
住 所：東京都足立区新田3-15-4
電 話：03-5390-1985


製造業者名：有限会社林製作所
住 所：東京都足立区新田3-15-4
電 話：03-5390-1985

販売業者名：宝神株式会社
住 所：東京都台東区上野5-7-11
MRビル4階
電 話：03-3836-5874

製造番号：210817



取扱説明

装着方法

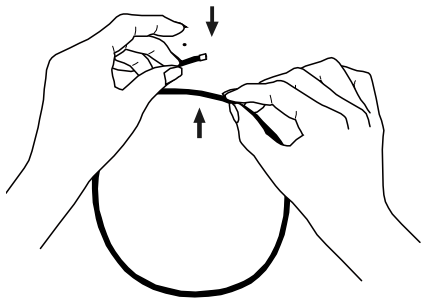

- 端部を近づけ、お好きな長さで手を放すとつなぐことができます。
- 脱落を防ぐため、10cm以上重ねてご使用ください。


着脱方法

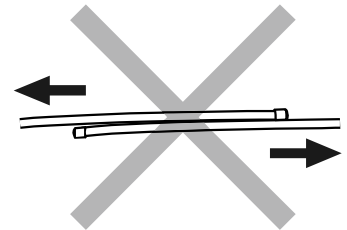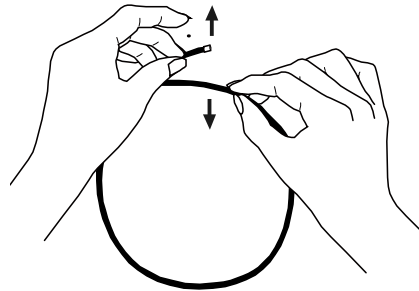


- 着脱時は、端から「剥がす」ようにしてご使用ください。(左図)
- 左右から引くようにご使用いただくと、本体内部のチューブが伸びる恐れがありますので、ご注意ください。

ご注意事項


- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- 本製品は、防水仕様ではございません。水泳・海水浴・入浴・サウナでのご使用はしないでください。また、洗濯はお避け下さい。
- 洗剤・漂白剤・シンナーやベンジンなどの有機溶剤・洗濯機・乾燥機などは使用しないでください。
- 高温なものへ近づけることはお避け下さい。
- 濡れた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 破損の恐れがありますので、製品本体に大きな力を加えないでください。

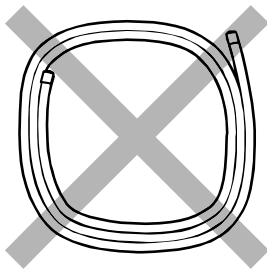

- 巻く際には角を作らずに、丸く巻いてください。

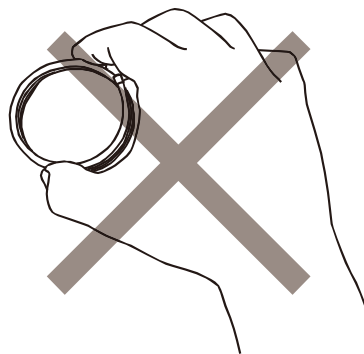

- 小さく巻かないでください。

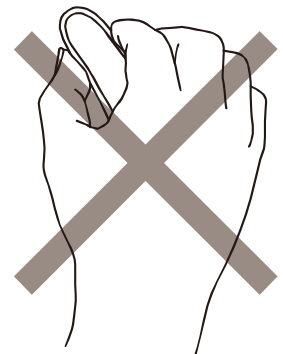

- 折り曲げないでください。

- 巻いて保管する場合は、右ページの大きさを目安にしてください。

管理医療機器 磁気ネックレス
大人の癒し

otonano iyashi bellissimo


この度は、大人の癒しbellissimo（ベリッシモ）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこのお取り扱いのしおりを良くお読みの上、正しくお使いください。

首・肩こりの状態

「こり」は、生活の中の緊張や疲労によって、筋肉が収縮して固くなる状態をいいます。このような状態では血行が悪くなり、これがまたこりを増長してしまいます。

磁気により血行を改善

磁気ネックレスの磁気は、筋肉内の血管に働きかけて、老廃物を流しこりをほぐします。

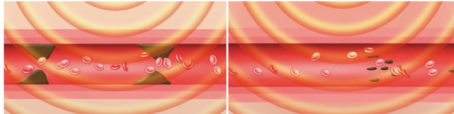


装着前イメージ

装着後イメージ

大人の癒しの構造


大人の癒しは、端から端まで 136 個の強力なネオジム磁石（130mT±30mT、最大磁束密度 160mT）が内蔵されています。お好きな長さで、さっと装着するだけで、こりの位置に合わせて装着しなくても首・肩のこりにアプローチすることができます。

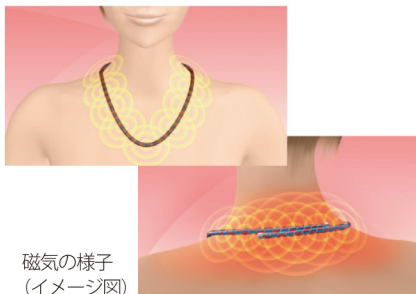

磁気の様子
(イメージ図)


装着のしかた

装着は、お好きな長さで端部を近づけて手を離すだけ。留め具が無いのでとても簡単です。使用時の脱落を防ぐため、10cm 以上重ねるようにお使いください。

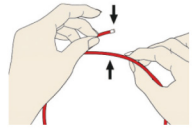

取り外し方

端部を持って引きはがすようにしてください。

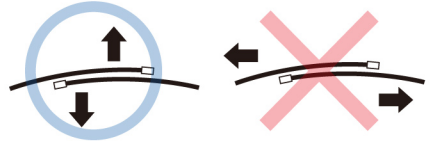

ご注意点

- 大人の癒しは、防水仕様ではございません。入浴や水泳の際は外してください。
- 就寝時は、寝返りなどで思わぬ力が加わり製品が破損する場合がございますことから、取り外していただくことをお勧め致します。
- 強力な磁石を用いた製品ですので、ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、または脳脊髄液短絡術用可変シャントなどの医用電気機器を使用している方は誤作動を招く恐れがあるので使用しないでください。また、現在治療を受けている方は、医師にご相談の上でご使用ください。
- 乳幼児は、製品を噛んだりして破損し誤飲する可能性がありますので、手の届かない所に置き、ご使用はご遠慮ください。

お問合せ先

宝神株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野 5-7-11 MRビル4F

TEL : 03-3836-5874 (平日 10時～18時)

E-mail : info@ho-jin.tokyo